


介護ベッド機種別接続方法（楽匠Z、Q-AURA用）


1. 接点ユニットの動作設定 ※電源を切り、本体のカバーを開けて下さい。

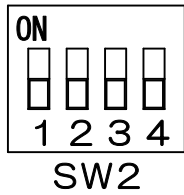

- SW2の1～4のノブ(突起)をスライドして動作設定を行います。
- 1：OFFにして下さい
- 2：角度リミット機能を使用する場合ON、使用しない場合OFF
- 3：まなぶくんと有線通信の場合ON、赤外線通信の場合OFF
- 4：まなぶくんと有線通信の場合ON、赤外線通信の場合OFF

2. 介護ベッドへの接続 ※必ずベッドの電源を切ってから行って下さい。

- 介護ベッド接続ケーブルを楽匠ZコントロールボックスのNURSE（HAND2）コネクタに接続して下さい。
※手元スイッチは通常通りHANDへ接続

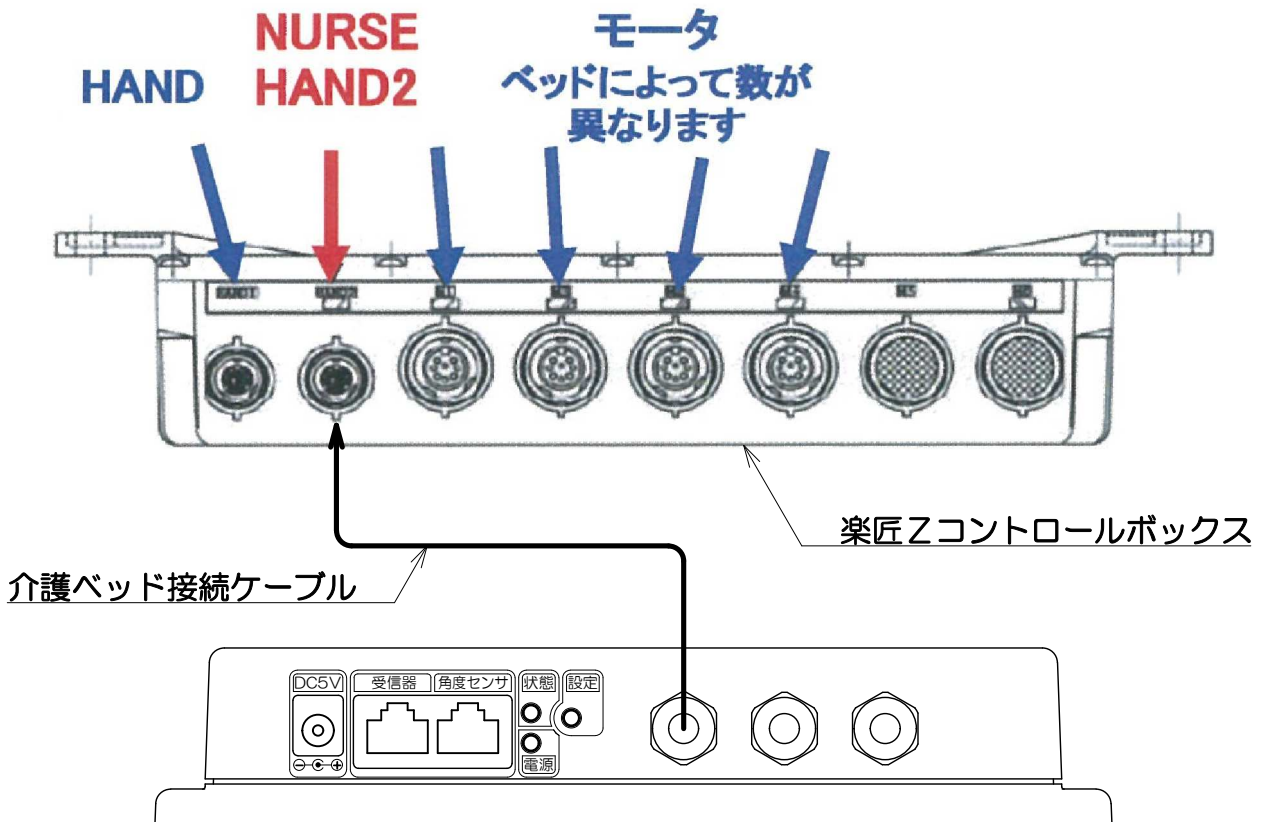

3. 接点の割当て

- 各接点は下記のように割当てられています。

接点番号	動作	備考
1	背上げ	介護ベッド接続ケーブルが配線済みです。
2	背下げ	
3	足上げ	
4	足下げ	
5	高さ上げ	
6	高さ下げ	
7	未使用	汎用接点出力として使用できます。 操作する機器を配線して使用して下さい。
8	未使用	
9	未使用	
10	未使用	